

Használati útmutató Alkoholszonda

AT128



PNI

‘ALC Nose’alkoholszonda csak akkor kellene használni amikor egy százalékos belélegzett alkohol levegő jelzésT ad le. Nem kell csak erre hivatkozni , hogy megállapítsa, hogy olyan állapotban van, hogy, képes vezetni a járművet, hogy egy berendezést vagy veszélyes tevékenységeket el tud végezni.

Minden szervezet másképp reagál az alkoholra, ezért a tesztelés eredményét úgy kell tekinteni mint egy hivatkozás és nem egy szabványos téma, hogy későbbi döntéseket hozzon.

Gyártó, forgalmazó vagy importőr nem vállal semmilyen felelőséget ennek a terméknek a használatához, bármilyen ok miatt. Ezt a terméket nem arra kell használni , hogy megtudjuk, hogy az illető képes vezetni a járművet vagy egy készüléket törvény szerint. Bármely típusú alkoholfogyasztás, befolyásolja az illető reakcióit és a tisztánlátását vezetés közben .

Főbb jellemzők:

- ◇ Új technológiás gyors érzékelő
- ◇ Gyors válasz
- ◇ Stabil teljesítmény , összeszerelhető SMD
- ◇ intelligens MCU ellenőrzés
- ◇ LCD képernyő
- ◇ Hordozható
- ◇ Egyéni higiénikus fúvókát használ
- ◇ Audió figyelmeztetés
- ◇ Energiatakarékosság, alacsony akkumulátor-jelző



Műszaki információk:

Új technológiás gyors érzékelő

Érzékelési mező: 0.00-2.00g/L (0.00-0.20% BAC, 0.00 ~ 2.0‰BAC;

0.00-1.00mg/L)

Pontosság:10% F.S

Előre beállított szint:0.50g/L (0.05% BAC; 0.5‰BAC; ;

0.24mg/L)


Bemelegítési idő: <10 ms. (Initial Warm-up 18 ms.)

Tesztelési idő: < 8 ms.

Kijelző: LCD kijelző három számjeggyel piros LEDdel

Tápellátás: 3VDC (2 × AAA elemek)

Üzemi mód:-10°C - 50°C≤95%RH Méretek: 90mm X 30mm
16mm / 45g

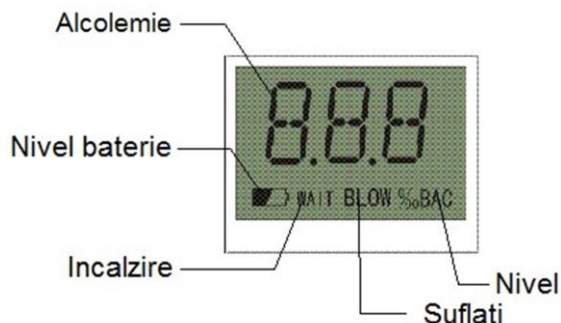

Javallatok:

0.00 g/L Levegőben lélegzett alkoholt szint

WAIT Kérjük várjon

BLOW Kész a tesztelésre

■ □ Az elem teljesen kimerült, kérjük cserélje ki.

‘ALC Nose’ alkoholszondát a levegőben lélegzett gyors alkohol szint felismerésére lehet használni. Ha sok alkoholt fogyasztottak az érzékelő egy erős audió jelt fog leadni ha meghaladta megálapított korlátot.

Üzemeltetési utasítások:

1. Nyomja lefelé a fedőt, hogy kinyissa az elem rekeszt, helyezze be az elemeket és zárják be óvatosan, kérjük tartsák be a polaritás helyes irányát az elem rekeszében, ellenben a készülék megsérülhet.
2. Ha egy pontos eredmény szeretne megkapni : ne fújon füstöt és ne helyezzen be nyáladzatot az érzékelő bemenetéhez ; tartsák távol a készüléket folyékony anyagoktól és helyezze egy biztos tárolási helyre ; ne tisztítsák meg bármilyen tisztítószerrel; ha nyáladzat található az érzékelő bemeneténél a rendes tesztelés megvalósítását megzavarná.
3. Hogy megbizonyosodjon a tesztelés eredményéről kérjük várjon 10 percet az alkoholfogyasztás után
4. Nyomja meg a ‘switch’ gombot , a tartalék lámpa ki fog nyitodni egy rövid csengőhanggal jelezve. Várjanak 10 másodpercet, hogy az érzékelő felmelegedjen (vagy 18 másodpercet ha az érzékelő nem volt használva), a képernyőn meg fog jeleni az időmérés 10-0ig , várjon ameddig eltűnik a “Wait” üzenet.
5. Fújon a gázbemenetbe miután megjelenik a “C” betű és a “blow” szó, kérjük ki és belélegezen közvetlenül a gázbemenetbe 3-4cm távolságra, abban a pillantban amikor a “C” betű és a “blow” szó eltűnik a képernyőről akkor álljon le a fújással ,

Szintén egy audio jel fogja említeni, hogy álljon le.

6. Olvassák le az eredményt , az LCD vissza fog térni az alkoholfokhoz, az eredmény 8 másodpercig fog megjelenni a képernyőn ,egy audio jellel az energiátápellátás automatikusan megszűnik.

7. Ha szükséges egy új tesztelés nyomja meg újból a “switch”gombot és kövessék a fenti lépéseket.

Megjegyzés:

1. Kerülje tartsa távol a túl erős ütéstől és tartsák a készüléket a dobozában.

2. Ne tisztítsák meg bármilyen tisztítószerrel ellenben a normális tesztelés ne fog pontos eredményt mutatni.

3. Általában a készülék még pontosabb eredményt mutat ha előre beállított szinten van

4. Ha egy hosszú tárolás után az eredeti alkohol szint az LCDén egy magas szintet mutat kérjük kapcsolja ki majd utána be addig míg a szint 0.00 lesz.

A termék job teljesítmény, fenntartjuk a jogot, hogy a tervezési design-t megváltoztassuk , előzetes értesítés nélkül.

The logo for PNI is displayed in a large, bold, black sans-serif font. It is centered horizontally and positioned in the lower half of the page. The background behind the logo consists of several overlapping, semi-transparent blue shapes that create a sense of depth and movement, resembling a stylized landscape or abstract design.

