

Manual de utilizare detector de alcool

PNI AT128



PNI

Detectorul de alcool 'ALC Nose' ar trebui folosit numai pentru a da o indicatie pentru un posibil procentaj de alcool din respiratie/sange. Nu trebuie sa va bazati doar pe acesta, pentru a determina daca: aveti o intoxicatie sau sunteti in stare sa conduceti un autovehicul, sa manipulati un echipament sau sa va angajati in activitati periculoase.

Fiecare organism in parte reactioneaza diferit la consumul de alcool, de aceea rezultatul testului trebuie considerat drept referinta si nu un standard de subiect pentru decizii ulterioare.

Fabricantul, importatorul sau distribuitorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru utilizarea acestui produs pentru orice motiv. Acest produs nu trebuie folosit ca un instrument pentru a stabili daca o persoana este capabila de a conduce un autovehicul sau un dispozitiv din punct de vedere legal si in conditii de siguranta. Consumul de orice tip de alcool va afecta reflexele si discernamantul de a conduce un autovehicul.

Caracteristici principale:

- ◇ Sensor rapid de ultima generatie
- ◇ Raspuns rapid
- ◇ Performanta stabila, SMD asamblabil,
- ◇ Control MCU inteligent
- ◇ Ecran LCD
- ◇ Portabil
- ◇ Se utilizeaza mustiucuri igienice
- ◇ Avertizare audio care depaseste limita pre-setata
- ◇ Consum redus de energie, indicator tensiune scazuta



Informatii tehnice:

Senzor rapid de ultima generatie

Domeniu de detectie: 0.00-2.00g/L (0.00-0.20%BAC, 0.00~2.0‰BAC;
0.00-1.00mg/L)

Precizie: ±10% F.S

Nivel presetat: 0.50g/L (0.05%BAC; 0.5‰BAC; 0.24mg/L)

Timp de incalzire: <10 sec (Initial Warm-up 18 sec)


Timp de testare: < 8 sec

Monitor: Afisaj cu 3 digits LCD cu led rosu


Alimentare: 3VDC (2 × AAA baterii)

Mediul de lucru: -10°C - 50°C ≤95%RH

Dimensiuni: 90mm X 30mm X 16mm @ 45g

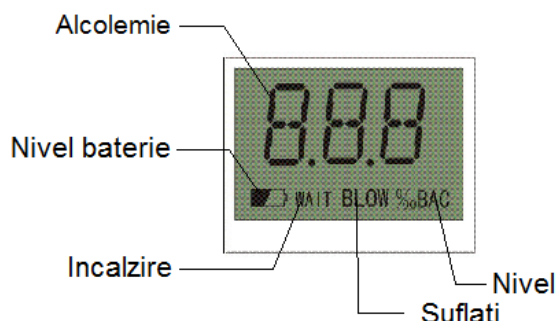

Indicatii:

| | |
|---|--|
| 0.00 g/L | Gradul de alcolemie in aer respirat |
| WAIT | Va rugam asteptati |
| BLOW | Gata de testare |
|  | Bateria s-a epuizat, va rugam inlocuiti. |

Detectorul de alcool 'ALC Nose' poate fi folosit pentru detectarea rapida a alcoolului in monstra de respiratie. Daca sunteti in stare de ebrietate avansata, detectorul va transmite un semnal audio mai puternic decat limita stabilita.

Instructiuni de operare:

1. Impingeti capacul in jos pentru a deschide compartimentul bateriei, inserati bateriile si inchideti cu grija, va rugam sa retineti directia corecta a polaritatii in compartimentul bateriei, in caz contrar puteti deteriora unitatea.
2. Pentru a asigura un rezultat precis de testare. Nu insuflati fum sau nu introduceti saliva in gura de intrare a detectorului. Tineti aparatul departe de toate lichidele si depozitati intr-un loc sigur. Nu stergeti cu orice agent de curatare. Daca exista saliva in gura de intrare a detectorului, testarea normala ar fi perturbata.
3. Pentru a asigura rezultatul testarii, va rugam asteptati 10 minute dupa consumul de alcool sau de fumat.
4. Apasati butonul 'switch', lampa de rezerva se deschide cu o scurta sonerie de apel. Asteptati 10 secunde ca senzorul sa se incalzeasca (sau 18 secunde daca detectorul nu a mai fost folosit), va apare pe ecran cronometrarea de la 10-0, asteptati pana cand dispare mesajul "Wait".
5. Suflati in intrarea de gaz imediat ce apare litera "C" si cuvantul "blow", va rugam inspirati si expirati direct in intrarea de gaz la o distanta de 3-4cm, in momentul in care litera "C" si cuvantul "blow" dispare de pe ecran va opriti din

suflat, de asemenea un semnal audio va aduce aminte sa va opriti.

6. Cititi rezultatul dupa ce expirati, LCD-ul va returna gradul de alcoolemie, rezultatul va fi afisat pe ecran timp de 8 secunde, cu un semnal audio, alimentarea cu energie se intrerupe automat.

7. Daca este nevoie de o noua testare , va rugam apasati din nou butonul “switch” si repetati pasii anteriori.

Notificare:

1. Evitati orice soc puternic si pastrati tester-ul in cutie sau in depozit.

2. Nu curatati cu orice agent de curatare, daca exista saliva , testarea normala va fi perturbata.

3. In general, tester-ul va fi mai precis daca este la nivelul prestat, daca trebuie sa specificati un punct exact, va rugam sa comandati de la distribuitorul local.

4. Dupa o lunga depozitare, daca nivelul initial al alcoolului de pe LCD inidica un nivel inalt, va rugam sa il inchideti si sa il deschideti pana ce nivelul este de 0.00.

In interesul imbunatatirii continue a produselor, ne rezervam dreptul de a schimba caracteristicile de design, fara notificare in prealabil.

The logo for PNI is displayed in large, bold, black capital letters. It is centered horizontally and positioned in the lower half of the page. The background behind the logo consists of several overlapping, semi-transparent blue shapes of varying shades, creating a modern, abstract design.